


Notice d'Utilisation

MEDAILLON

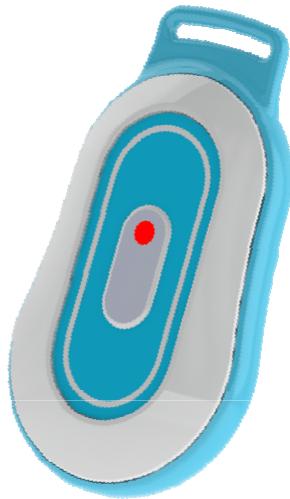

Caractéristiques

Médaille Appel Malade Radio

Portée : > 200 m (en champ libre)

Fréquence radio : 868 Mhz


Étanchéité : IP41

Dimensions : 70mm x 44mm x 16mm

Poids : 28 g

Matériaux boîtier : ABS (UL 94 HB)

PRINCIPE GÉNÉRAL

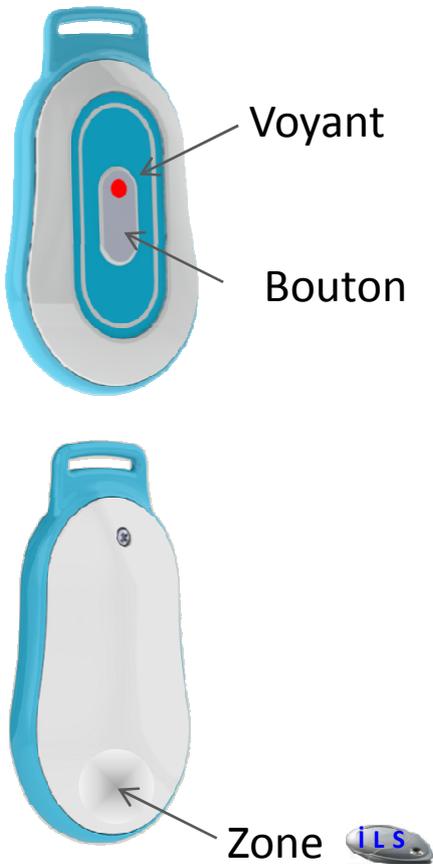

FONCTIONNEMENT	
	APPEL MALADE
(clock icon) < 4s PASSAGE COURT	ACQUIT PRESENCE
+ MAINTIENT SIMULTANÉ	APPEL D'URGENCE

MAINTENANCE	TEST PILE
(clock icon) > 4s MAINTIENT LONG	PILE BONNE PILE MOYENNE PILE FAIBLE

Légende	
	Passage Aimant ILS (au dos)
	Appui bouton (en façade)
	Délai
	Clignotement rouge
	Clignotement Vert
	Clignotement Rouge et Vert

Remplacement de la pile




Etape 1 :

Oter la vis, ouvrir le boîtier en tirant sur la languette de l'anneau bleu et enlever l'anneau.



Etape 2 :

Retirer la carte électronique, retirer la pile en maintenant la carte par les côtés et en faisant attention à ne pas toucher le composant situé juste sous la pile.

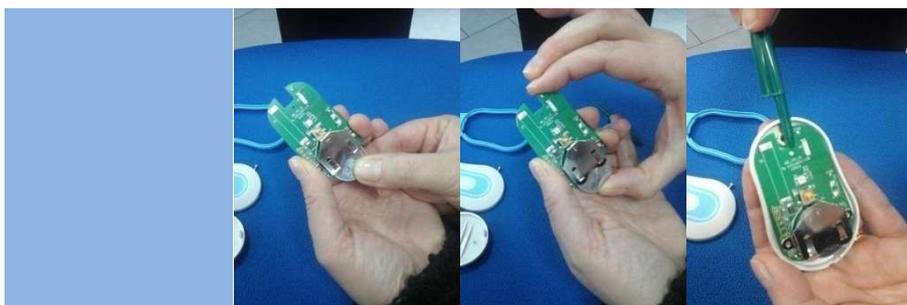

Etape 3 :

Insérer la nouvelle pile (le médaillon peut émettre un appel à ce moment là), positionner la carte dans le boîtier (pile sur le dessus).



Etape 4 :

Positionner l'anneau par le bas en l'ajustant par rapport à la patte de fixation puis ajuster sur les bords en remontant vers le haut.



Etape 5 :

Placer le couvercle en veillant à « clipser » l'ensemble et remettre la vis.

Entretien courant

Vous pouvez utiliser de l'eau et du savon, ou tous les produits d'usage courant pour le plastique.

Pour les taches de graisse/d'huile, vous pouvez utiliser l'isopropanol, mais juste pour essuyer rapidement. Ne pas faire tremper le boîtier dans ce produit, ni laisser le produit sur la surface longtemps.

Pour tout autre produit, veuillez à demander au fabricant du nettoyeur si son produit est applicable sur le plastique ABS.