


Notice d'Installation

RECEPTEUR



Caractéristiques

Récepteur Appel Malade Radio
Fréquence radio : 868 Mhz
Dimensions : 120mm x 80mm x 34mm
Poids : 120 g
Matériaux boîtier : ABS (UL 94 V0)

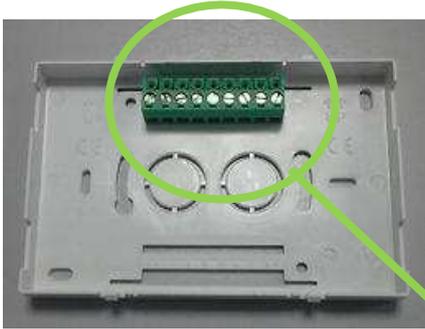

Câblage du Récepteur


Signaux

ALIMENTATION RS422_Tx RS422_Rx

0V	12-24 VDC	NC	SC1	RS1_A	RS1_B	SC0	RS0_A	RS0_B
----	-----------	----	-----	-------	-------	-----	-------	-------


Fonctions	Borniers	Signal
ALIMENTATION	0V	ALIM -
	12-24 VDC	ALIM +
RS422_TX	SC1	Blindage Tx
	RS1_A	Tx_A
	RS1_B	Tx_B
RS422_RX	SC0	Blindage Rx
	RS0_A	Rx_A
	RS0_B	Rx_B

Les blindages Rx et Tx peuvent être connectés ensemble sur SC1 ou SC0 indifféremment.

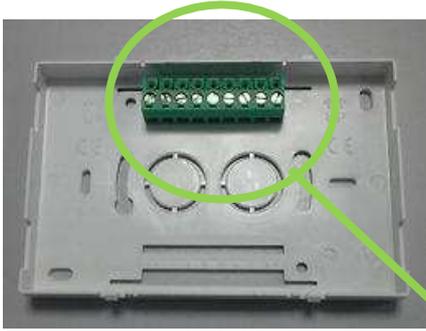


Câblage du Récepteur

Plan

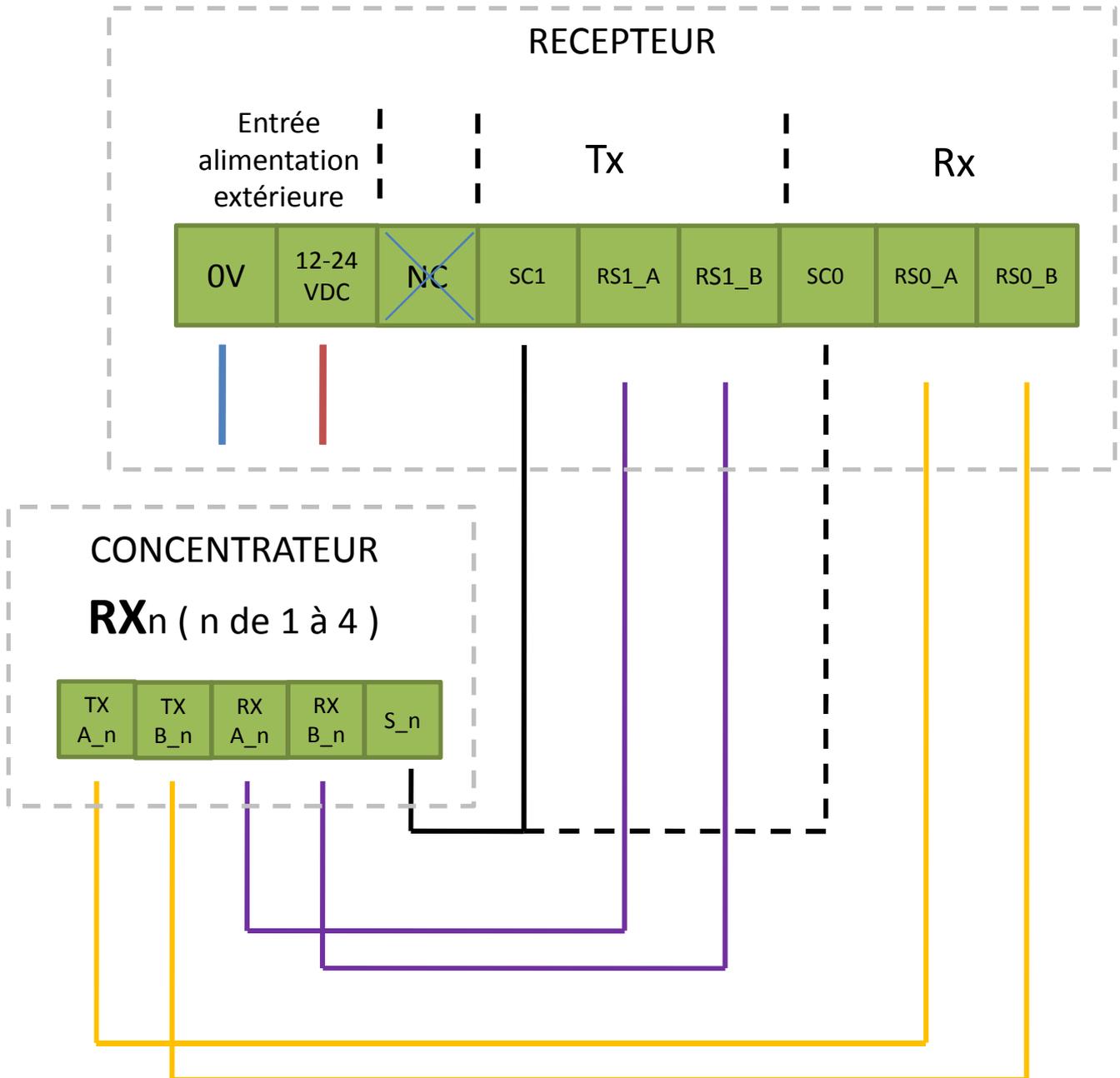

Boitier Récepteur

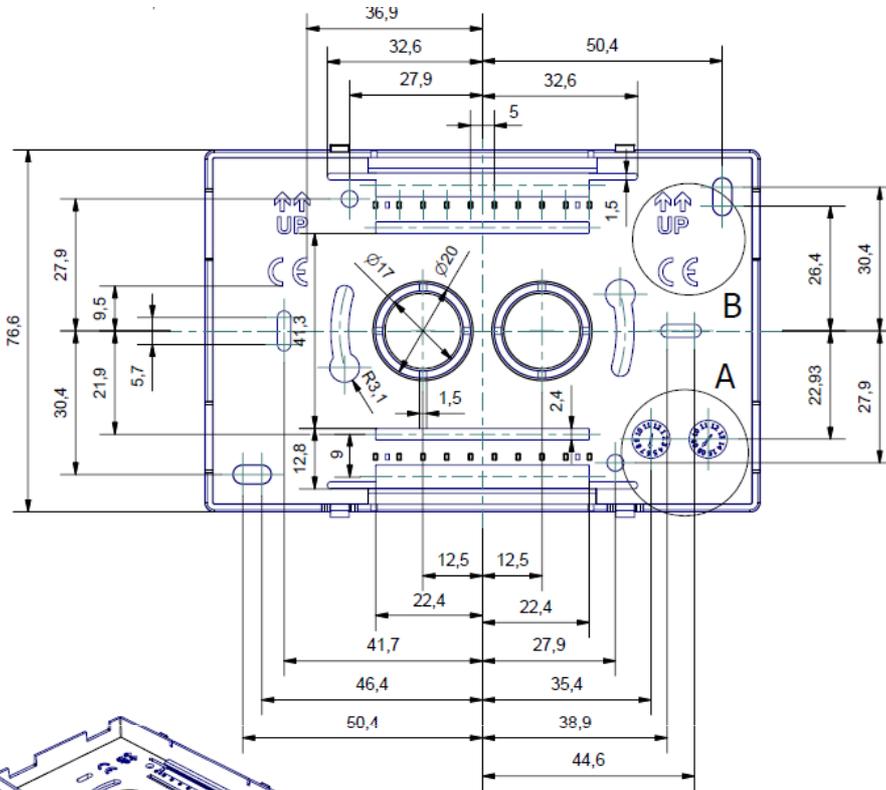

**Pose en fixation murale
(visserie non fournie)**

Antenne toujours en position verticale

Standard Fixe Option Coudée

